

進化したネブライザー





Flexineb E2は、馬の気道や肺野を 治療する時、薬剤を噴霧し、又、 自然療法をする時に使用する革命 的な馬用ネブライザーです。 再充電可能なバッテリーで作動し、 透明なエアロゾルチャンバーと投 薬カップを備えたユニークなフレ キシブルマスクインターフェース を備えています。

Flexineb E2は、使用が簡単で、静かに安全性を考えたポータブルな馬の吸入装置です。馬のパフォーマンスを常に保持したいと考える方に理想的なソリューションです。 噴霧&吸入療法は、COPD、RAO(ヒーブ)&EIPH(出血)などの馬の慢性の問題を治療する最も効果的な方法です。



動物用医療機器届出番号:29動薬第609号



Flexineb E2は慢性的な呼吸器疾患を治療するだけでなく、冬季に咳や鼻水が発症するような場合や、1年中を通して急性副鼻腔炎、または馬の肺炎や馬のインフルエンザに使用できる有効なシステムです。



関連する呼吸器系の問題を治療するためにエアロゾル化された薬剤を下気道に導入するには、噴霧される粒子のサイズが非常に重要です。これらの微粒子は、下部気道(例えば、肺)の深部に届けるために、直径が1~5ミクロン(10 ^ -6)の範囲内になければなりません。

NortevのFlexineb E2 Equineネブライザーは、用途や薬剤や液体の噴霧に応じてさまざまなタイプの薬物(メディカル)カップを供給できる点で独特です。抗生物質やエッセンシャルオイルのようないくつかの薬剤や溶液は、他の液体よりもかなり粘稠です。これらの液体は、噴霧の速度を変えなければなりません。Flexineb E2は、異なる噴霧速度のカップを使用することでこの問題に対処できます。

グレーカップは、ゲンタマイシンやアミカシンなどの抗生物質、クレンブテロールのような気管支拡張剤、デキサメタゾンのようなコルチコステロイドとの併用が推奨されています。これは標準的なカップです。

緑色メッドカップは、Cobactan®、Excenel®、R-Nystatineなどの霧状にすることが困難な抗生物質やバルサミコエアなどの自然療法に使用することをお勧めします。このカップはより速い噴霧を可能にしています。。

ネブリンと一緒に使用するにはBLUEメッドカップをお勧めします。標準的なグレーカップよりも遅い噴霧を提供します。



